

# Global Travel Club

## Avis aux patients DPA qui voyagent en avion avec leur Homechoice Claria

**Prenez toujours contact avec votre compagnie aérienne avant de voyager afin de signaler que vous allez voyager avec un dispositif médical.**

### Documents utiles lors d'un voyage :

- Déclaration médicale
- Informations techniques concernant le Homechoice Claria

### Où le Homechoice Claria doit-il être stocké durant le vol ?

Le Homechoice Claria doit être conservé avec les bagages spéciaux.

### Où dois-je déposer le Homechoice Claria lors de l'enregistrement ?


Le Homechoice Claria doit être enregistré via le guichet réservé aux objets fragiles.

### Comment la compagnie aérienne sait-elle comment transporter l'appareil ?

Le Baxter Travel Club vous fournira un élastique spécial réservé à la mallette contenant l'appareil. Cet élastique sera à placer autour de la mallette. Lors de l'enregistrement, insistez sur le fait qu'il s'agit d'un dispositif médical d'une importance vitale, qui doit être manipulé délicatement.



Pour assurer le transport correct de votre Homechoice Claria, le Baxter Travel Club vous fournira un élastique à placer autour de la mallette de votre appareil :

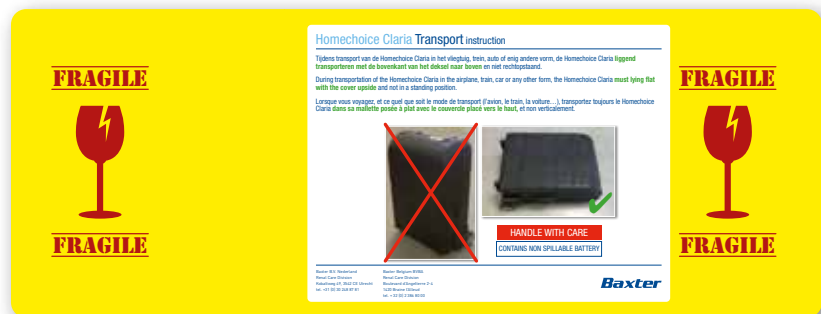

**Lorsque vous arrivez sur votre lieu de séjour, le Homechoice Claria aura besoin d'un peu de temps pour s'acclimater.**

### Voici nos conseils pour éviter tout problème :

- Sortez votre Homechoice Claria de sa mallette dès que vous arrivez sur votre lieu de séjour ;
- Placez le Homechoice Claria à l'endroit où vous comptez l'utiliser durant votre séjour ;
- Ne l'allumez pas ;
- Attendez au moins 2 heures ou le temps que l'appareil et les accessoires soient à température ambiante (20-22°C) avant d'utiliser votre matériel.

De cette manière, l'appareil aura eu suffisamment de temps pour s'acclimater. Vous pouvez maintenant profiter au mieux de votre séjour.